

HYALO4

Adhesive Foam Border

Pansament din spumă poliuretanică cu adeziv siliconic, cu margini

Indicat pentru plăgi cu exsudat moderat către abundent

Descrierea produsului

Pansamentul din spumă poliuretanică cu adeziv siliconic, cu margini HYALO4 este un pansament steril, realizat din spumă poliuretanică hidrofiliă, absorbantă, conceput pentru a absorbi exsudatul. Stratul exterior pansamentului este o peliculă de poliuretan roz, cu frecare redusă și rezistentă la apă, care asigură o barieră bacteriană.

Stratul perforat de contact cu plaga, cu adeziv siliconic, permite absorbția exsudatului și previne excesul de lichide ce provoacă macerarea pielii sănătoase. Stratul perforat de contact cu rana previne aderarea pansamentului la plagă și reduce durerea la schimbarea pansamentului, împiedicând formarea țesutului de granulație în porii spumei și reducând astfel trauma la scoaterea pansamentului.

Pansamentul din spumă poliuretanică cu adeziv siliconic, cu margini HYALO4 menține un mediu umed pentru a facilita procesul de vindecare a plăgilor cu exsudat moderat către abundent.

Pansamentul din spumă poliuretanică cu adeziv siliconic, cu margini HYALO4 asigură o aderență delicată dar sigură la piele, jupuirea pielii și durerea la îndepărtare fiind minime.

Nu conține latex de cauciuc natural.

Indicații

Pansamentul din spumă poliuretanică cu adeziv siliconic, cu margini HYALO4 este indicat pentru plăgile cronice și acute, cu exsudat moderat către abundent, în timpul procesului de vindecare. Pansamentul poate fi utilizat pentru următoarele plăgi: ulcerații de decubit, ulcere venoase și arteriale picioare, ulcerații diabetice, răni chirurgicale postoperatorii, abraziuni ale pielii, plăgi traumatice, arsuri de grosime superficială și parțială; poate fi folosit și ca pansament secundar pentru plăgile penetrante.

Pansamentul din spumă poliuretanică cu adeziv siliconic, cu margini HYALO4 poate fi folosit sub bandaje de compresie.

Contraindicații

- A nu se folosi pansamentul pentru persoanele cu sensibilitate cunoscută la pelicule sau spume de poliuretan și silicon.
- A nu se folosi cu soluții oxidante cum ar fi hipocloritul sau peroxidul de hidrogen, deoarece acestea pot descompune partea absorbantă din poliuretan a pansamentului.
- Nu este indicat pentru implanturi chirurgicale.

Măsuri de precauție

- A nu se folosi pentru plăgile uscate sau cu cantitate redusă de exsudat.
- A nu se folosi pentru arsuri de grosime completă.
- A nu se refolosi integral sau parțial, deoarece poate compromite sterilitatea și/sau performanța pansării.
- Pansamentul nu trebuie ingerat și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor și animalelor.
- A nu se acoperi cu un pansament ocluziv, deoarece acesta va afecta capacitatea de gestionare a fluidului și va prejudicia performanța pansamentului.
- A se folosi sub îndrumarea unui cadru medical.

Indicații de utilizare

Pregătirea zonei și aplicarea pansamentului

1. Dacă este necesar, irigați zona plăgii conform protocoalelor standard.
2. Uscați cu grijă zona din jurul plăgii înainte de a aplica pansamentul.
3. Alegeți un pansament din spumă poliuretanică cu adeziv siliconic, cu margini HYALO4 care să fie puțin mai mare decât plaga. Tamponul din spumă trebuie să depășească (cu cel puțin 2 cm) plaga deschisă în toate direcțiile.
4. Centrați pansamentul și aplicați-l cu grijă peste plagă (partea albă pe plagă).
5. Apăsați delicat pansamentul pe pielea din jur.

Schimbarea și scoaterea pansamentului

1. Pansamentul din spumă poliuretanică cu adeziv siliconic, cu margini HYALO4 poate rămâne in situ până la 7 zile, în funcție de starea pacientului și de cantitatea de exsudat. Ar putea fi necesar să schimbați pansamentul mai des sau respectând bunele practici de îngrijire a plăgilor.
2. Scoateți cu grijă pansamentul de pe patul plăgii și eliminați-l conform procedurilor și orientărilor locale.
3. Dacă este necesar, curățați zona plăgii cu un produs adecvat de curățare a rănilor înainte de aplicarea unui nou pansament.

Data emiterii: Mai 2019