

## **HYALO4**

### **High Gelling Fibre / Rope**

Pansament de înaltă performanță

#### **Indicat pentru plăgi cu exsudat moderat către abundent**

##### **Descrierea produsului**

Pansamentul de înaltă performanță HYALO4 este o bandă sau un tampon din material textil nețesut, steril, realizat din carboximetilceluloză (CMC) și alginat de calciu G (acid guluronic), cu un strat de consolidare pentru a permite scoaterea intactă. Pansamentul este moale și conformabil, foarte absorbant și cu grad ridicat de gelificare.

Pansamentul de înaltă performanță HYALO4 gestionează exsudatul plăgilor cu exsudat moderat către abundent și creează un mediu favorabil pentru gestionarea eficientă a plăgii. În contact cu exsudatul plăgii pansamentul extrem de absorbant formează un gel moale, care facilitează menținerea unui mediu umed al plăgii, ceea ce sprijină procesul de vindecare a rănilor și stimulează debridarea autolitică (îndepărtarea țesutului non-viabil).

Nu conține latex de cauciuc natural.

##### **Indicații**

Pansamentul de înaltă performanță HYALO4 este indicat pentru gestionarea plăgilor cronice și acute, de grosime parțială și completă, cu exsudat moderat către abundent, în timpul procesului de vindecare. Pansamentul este indicat pentru următoarele plăgi: ulcerații de decubit, ulcere venoase și arteriale picioare, ulcerații diabetice, grefe și zone donatoare, lacerări și abraziuni, plăgi chirurgicale postoperatorii, arsuri de grosime superficială și parțială, plăgi penetrante.

Pansamentul de înaltă performanță HYALO4 poate fi folosit sub bandaje de compresie.

##### **Contraindicații**

- A nu se folosi pansamentul pentru pacienții cu sensibilitate cunoscută la carboximetilceluloză (CMC), algiinați sau nylon.
- Nu este indicat pentru implanturi chirurgicale.

##### **Măsuri de precauție**

- A nu se folosi pentru plăgile uscate sau cu cantitate redusă de exsudat, deoarece pansamentul se poate lipi de plagă.
- A nu se refolosi integral sau parțial, deoarece poate compromite sterilitatea și/sau performanța pansării.
- Pansamentul de înaltă performanță HYALO4 nu trebuie ingerat și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor și animalelor.
- A se folosi sub îndrumarea unui cadru medical.

##### **Indicații de utilizare**

### *Pregătirea zonei și aplicarea pansamentului*

1. Dacă este necesar, debridați și irigați zona plăgii în conformitate cu protocoalele standard.
2. Îndepărtați soluția în exces de pe pielea din jur.
3. Alegeți un pansament de înaltă performanță HYALO4 care să fie puțin mai mare decât plaga.
4. Dacă este necesar, tăiați pansamentul (folosind foarfece sterile) la dimensiunea adecvată plăgii. Aplicați direct pe patul plăgii.
5. Toate materialele de pansare rămase trebuie aruncate, respectând procedurile și orientările locale, din cauza riscului de contaminare.
6. Plăgile adânci nu trebuie pansate foarte strâns, având grijă ca pansamentul să nu depășească marginile plăgii.
7. Acoperiți și fixați pansamentul cu un pansament secundar neocluziv sau semi-ocluziv, de exemplu pansamentul cu hidrocoloid HYALO4 sau spumă poliuretanică HYALO4.

### *Schimbarea și scoaterea pansamentului*

1. Pansamentul poate rămâne in situ până la 7 zile. Frecvența de schimbare a pansamentului va depinde de starea pacientului și de cantitatea de exsudat. Schimbați pansamentul atunci când pansamentul secundar și-a atins capacitatea absorbantă sau conform bunelor practici de îngrijire a plăgilor.
2. Îndepărtați cu grijă pansamentul secundar.
3. Dacă plaga pare uscată, saturați pansamentul cu soluție salină sterilă înainte de îndepărtare.
4. Scoateți ușor pansamentul de pe patul plăgii și eliminați-l conform procedurilor și orientărilor locale.
5. Dacă este necesar, irigați zona plăgii cu un produs adecvat de curățare a rănilor înainte de aplicarea unui nou pansament.

Data emiterii: Mai 2019