

HYALO4

Non Adhesive Foam

Pansament neadeziv din spumă poliuretanică

Indicat pentru plăgi cu exsudat moderat către abundent

Descrierea produsului

Pansamentul neadeziv din spumă poliuretanică HYALO4 este un pansament steril, realizat din spumă poliuretanică hidrofilă, absorbantă, conceput pentru a absorbi exsudatul.

Stratul exterior pansamentului este o peliculă de poliuretan roz, cu frecare redusă și rezistentă la apă, care asigură o barieră bacteriană. Stratul perforat de contact cu plaga permite absorbția exsudatului și previne excesul de lichide ce provoacă macerarea pielii sănătoase. Stratul perforat de contact cu rana previne aderarea patului plăgii la pansament, împiedicând formarea țesutului de granulație în porii spumei și reducând astfel trauma la scoaterea pansamentului.

Pansamentul neadeziv din spumă poliuretanică HYALO4 menține un mediu umed pentru a facilita procesul de vindecare a plăgilor cu exsudat moderat către abundent.

Nu conține latex de cauciuc natural.

Indicații

Pansamentul neadeziv din spumă poliuretanică HYALO4 este indicat pentru plăgile cronice și acute, cu exsudat moderat către abundent. Pansamentul poate fi utilizat în timpul procesului de vindecare a următoarelor plăgi: ulcerații de decubit, ulcere venoase picioare, ulcerații diabetice, lacerări și abraziuni ale pielii, grefe și zone donatoare, plăgi chirurgicale postoperatorii, arsuri de grosime superficială și parțială; poate fi folosit și ca pansament secundar pentru plăgile penetrante.

Pansamentul neadeziv din spumă poliuretanică HYALO4 poate fi folosit sub bandaje de compresie.

Contraindicații

- A nu se folosi pansamentul pentru persoanele cu sensibilitate cunoscută la pelicule sau spume de poliuretan.
- A nu se folosi cu soluții oxidante cum ar fi hipocloritul sau peroxidul de hidrogen, deoarece acestea pot descompune partea absorbantă din poliuretan a pansamentului.
- Nu este indicat pentru implanturi chirurgicale.

Măsuri de precauție

- A nu se folosi pentru arsuri de grosime completă
- A nu se folosi pentru plăgile uscate sau cu cantitate redusă de exsudat.
- A nu se refolosi integral sau parțial, deoarece poate compromite sterilitatea și/sau performanța pansării.
- Pansamentul neadeziv din spumă poliuretanică HYALO4 nu trebuie ingerat și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor și animalelor.

- A nu se acoperi cu un pansament ocluziv, deoarece acesta va afecta capacitatea de gestionare a fluidului și va prejudicia performanța pansamentului.
- A se folosi sub îndrumarea unui cadru medical.

Indicații de utilizare

Pregătirea zonei și aplicarea pansamentului

1. Dacă este necesar, irigați zona plăgii în conformitate cu protocoalele standard și uscați pielea din jur înainte de aplicarea pansamentului.
2. Alegeți un pansament neadeziv din spumă poliuretanică HYALO4 care să fie puțin mai mare decât plaga. Dacă este necesar, pansamentul poate fi tăiat la dimensiunea dorită folosind foarfece sterile.
3. Centrați pansamentul și aplicați-l cu grijă peste plagă (partea albă pe plagă).
4. Puteți fixa pansamentul cu o bandă adezivă adecvată sau cu un bandaj neocluziv pentru a vă asigura că nu se deplasează. Asigurați-vă că banda adezivă este aplicată numai pe margini și că nu acoperă pansamentul, deoarece aceasta îi poate afecta performanțele. În mod alternativ, dacă este utilizat sub un bandaj de compresie, banda adezivă nu este necesară, deoarece bandajul va ține pansamentul in situ.
5. Toate materialele de pansare rămase trebuie aruncate, respectând procedurile și orientările locale, din cauza riscului de contaminare.

Schimbarea și scoaterea pansamentului

1. Pansamentul neadeziv din spumă poliuretanică HYALO4 poate rămâne in situ până la 7 zile, în funcție de starea pacientului și de cantitatea de exsudat. Ar putea fi necesar să țineți plaga sau pansamentul sub observație la început și să schimbați pansamentul conform bunelor practici de îngrijire a plăgilor.
2. Scoateți cu grijă pansamentul de pe plagă și aruncați-l. Eliminați-l conform procedurilor și orientărilor locale.
3. Dacă este necesar, curățați zona plăgii cu un produs adecvat de curățare a rănilor înainte de aplicarea unui nou pansament.

Data emiterii: Mai 2019